

Importatore in Italia:

FORNITURE DENTALI CASOTTO
DI CAPUZZO ENRICO & C. SNC
Via C.Anconitano, 10 - 35124 Padova
Tel: 0498805239 Cell: 3497217730
forniturecasotto@gmail.com

Vendite e assistenza tecnica in Europa:

Jensen GmbH
Gustav-Werner-Straße 1
72555 Metzingen, Germany
0800-8573230 | +49 7123-92260
info@jensendental.de
www.jensendental.de | www.miyoworld.eu

Prodotto da:

Chemichl AG
Landstrasse 114
9490 Vaduz, Liechtenstein
info@chemichl.com
www.chemichl.com



4368040523



GUIDA RAPIDA italiano

Per un inizio perfetto.



! Preparazione & Istruzioni d'uso

Preparazione


- La superficie deve essere pulita e priva di contaminazione superficiale prima di applicare il materiale.
- La superficie può essere sabbiata con una pressione di 1,5 bar a 50/110 µm.

Istruzioni d'uso

- Non versare il liquido nei contenitori delle masse. Prendere la pasta e mescolarlo col liquido in una piastra.
- Mescolare accuratamente InSync Glaze Paste I MiYO Glaze Paste con una spatola non metallica prima di ogni utilizzo.
- Tutti i ricambi MiYO e glaze paste non devono entrare in contatto con acqua.
- Utilizzare sempre un pennello pulito e asciutto.

Stoccaggio e smaltimento

- Conservare in luogo asciutto.
- Un quantitativo ridotto può essere depositato nei rifiuti domestici.

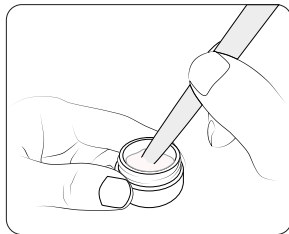

Mescolare accuratamente con una spatola non metallica.

🔥 Tabella di cottura

Cottura di lucentezza con Glaze Paste*	
Temperatura iniziale [°C]	400 - 450
Asciugatura [min]	3
Tempo di chiusura [min]	4
Incremento termico [°C/min]	45
Mantenimento 1 [s]	30 - 45
Inizio vuoto [°C]	580
Temperatura finale [°C]	710 - 720
Fine vuoto [°C]	710 - 720
Mantenimento 2 [s]	30 - 60
Tempo d'apertura [min]	1

*Le temperature di cottura indicate sono valori di riferimento e possono variare a seconda del tipo di forno.

📄 Downloads

La guida rapida e la scheda di sicurezza sono disponibili per il download all'indirizzo:

www.jensendental.de/en/downloads-en



🛒 Acquista Glaze Paste

Siete interessati ad acquistare la Glaze Paste?

Contattateci, saremo lieti di indirizzarvi al vostro rivenditore di zona!

💬 Contattaci & Supporto

**FORNITURE DENTALI CASOTTO DI
CAPUZZO ENRICO & C. SNC**

Mail: forniturecasotto@gmail.com

Whatsapp: 349 7217730

Tel: 049 8805239